

Guide d'installation de Simplicit^{90Y}™

2.4.0

1 Introduction

1.1 Historique de révision

Publication	Date	Raison de la publication	Révision publiée	Nécessaire pour des raisons de sécurité
Guide d'installation de Simplicit ^{90Y} ™ 2.4.0	26 octobre 2020	Publication initiale	R0	N/A
Guide d'installation de Simplicit ^{90Y} ™ 2.4.0	18 Janvier 2021	Ajout d'un représentant européen autorisé	R1	Non

1.2 Objectif

Ce document décrit le processus pour installer le progiciel Simplicit^{90Y}.

1.3 Portée

Simplicit^{90Y} est fourni avec un Guide d'utilisation en ligne qui explique comment utiliser le logiciel une fois qu'il a été installé.

Simplicit^{90Y} est fourni avec des notes de publication. Celles-ci contiennent des informations importantes et doivent être lues avant toute installation et utilisation du logiciel.

1.4 Autres formats

Une version en ligne des instructions d'utilisation de Simplicit^{90Y} 2.4.0 (y compris ce guide d'installation) est disponible sur <https://mirada-medical.com/eifu-Simplicit90Y-2-4-0-row/> et peut contenir des mises à jour qui ont été faites depuis que vous avez reçu votre copie de Simplicit^{90Y} 2.4.0.

Les instructions d'utilisation sur le site Internet nécessitent un lecteur PDF pour pouvoir utiliser les pages Web. Un navigateur récent (Internet Explorer 11, Firefox 62.0, Chrome 69.0 ou des versions ultérieures sont acceptables) est également requis.

Une copie papier des instructions d'utilisation de Simplicit^{90Y} 2.4.0 (y compris ce guide d'installation) est également disponible sur demande auprès de support@mirada-medical.com.

2 Informations sur le fabricant et sur le dispositif



En conformité avec la directive 93/42/CEE du Conseil



Emergo Europe B.V., Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague, The Netherlands



Mirada Medical Ltd.
New Barclay House
234 Botley Road
Oxford
OX2 0HP
Royaume-Uni



Date de fabrication : décembre 2020



<https://mirada-medical.com/eifu-Simplicit90Y-2-4-0-row/>

3 Installation

3.1 Logiciel

Votre fournisseur vous fournit le logiciel via une offre groupée de composants d'installation Windows ainsi que la documentation associée.

Dans l'offre groupée se trouvent :

- Le programme d'installation de Simplifici^{90Y}
- Les notes de publication sur Simplifici^{90Y}
- Le guide d'installation de Simplifici^{90Y} (ce document)
- Le guide d'utilisation de Simplifici^{90Y} au format PDF

Simplifici^{90Y} est un logiciel 64 bits et a besoin d'être installé sur des plateformes Windows 64 bits.

La documentation est disponible au format PDF.

3.2 Installation

3.2.1 Installation de Simplifici^{90Y}

Localisez et lancez le fichier d'installation de Simplifici^{90Y} puis suivez les invites à l'écran.

En installant ce logiciel, vous indiquez que vous acceptez le contrat de licence d'utilisateur final affiché par le programme d'installation.

Vous pouvez installer le logiciel à l'emplacement par défaut ou choisir un autre emplacement.

Cliquez sur **Install** pour commencer le processus d'installation. Vous pouvez recevoir une invite de Windows pour autoriser la poursuite de l'installation.

Cliquez sur **Finish** une fois que l'installation s'est achevée.

Remarque : la première fois que vous utilisez Simplifici^{90Y} après son installation initiale, l'emplacement, les paramètres locaux et le fuseau horaire de l'application seront réglés en fonction des paramètres locaux et de l'emplacement du système d'exploitation sur lequel Simplifici^{90Y} a été installé.

3.2.2 Ajout d'une licence


Lorsque l'installation de DBx et de Simplifici^{90Y} est achevée, vous êtes prêt à démarrer la procédure d'activation de licence.

Vous serez invité à saisir une licence pour Simplifici^{90Y} juste après le premier démarrage de DBx.

Si vous ne possédez pas encore de licence pour cette machine, vous devez en demander une au représentant de votre fournisseur. Cette requête doit comprendre la clé d'activation du produit affichée dans la fenêtre *Code de licence*.

Si vous utilisez une licence flottante, contactez votre représentant qui vous indiquera comment vous connecter au serveur de licences flottantes.

Une fois que le système est sous licence, il est prêt à être utilisé et la fenêtre principale DBx s'ouvre.

Sélectionnez Données et cliquez sur l'icône **Simplicité^{90Y}**  dans la barre latérale droite pour lancer l'application. Pour plus d'informations sur la sélection des données, consultez le Guide d'utilisation de Simplicité^{90Y}.

DBx et Simplicité^{90Y} proposent des fichiers d'aide en ligne qui contiennent des informations importantes sur l'utilisation du logiciel.

3.3 Configuration requise

Simplicité^{90Y} doit être installé uniquement sur un réseau interne sécurisé doté de mesures de protection appropriées, telles que des antivirus, des protections contre les logiciels malveillants et des pare-feux. Simplicité^{90Y} n'a pas besoin d'un accès à Internet.

Toutes les autorisations de niveau utilisateur doivent être configurées pour s'assurer que les utilisateurs disposent uniquement des niveaux de droits d'accès qui leur sont nécessaires. Ceci inclut les autorisations pour toutes les applications qui sont configurées pour envoyer des informations à Simplicité^{90Y} ou en recevoir du logiciel. Toutes les autorisations des utilisateurs doivent être régulièrement vérifiées.

Poste de travail/ordinateur portable

Élément	Configuration minimale	Configuration recommandée
Processeur	Intel Core i5 ou équivalent	Intel Core i7 ou équivalent
Mémoire	8 Go de RAM	16 Go de RAM
Disque dur	250 Go. 10 Go disponibles, vitesse 7 200 tr/min	500 Go SSD. 10 Go disponibles
Caractéristiques graphiques	Carte graphique de 128 Mo, DVI	Carte graphique de 512 Mo, DisplayPort
Résolution d'affichage	1920x1080	1920x1080, 2560x2048 ou similaire
Système d'exploitation	Windows 7 (64 bits) SP1 Windows 10 (64 bits)	Windows 7 (64 bits) SP1 Windows 10 (64 bits)
Vitesse du réseau	100 Mbps	1 Gigabit ou plus

Serveur client léger

Mirada recommande de manière individuelle les spécifications du serveur de manière à garantir son adéquation à l'environnement et au nombre d'utilisateurs simultanés. Ce tableau est donné uniquement à titre indicatif. Les machines du client doivent être récentes mais elles ne nécessitent pas de spécifications élevées et elles doivent pouvoir fonctionner sous Windows 7 (SP1 recommandé) ou sous Windows 10.

Élément	Configuration minimale	Configuration recommandée
Processeur	Quad Core Xeon ou équivalent E5420 2.50GHz	Triple cœur/2,5 GHz par utilisateur simultané
Mémoire	16 Go de RAM	16 Go de RAM par utilisateur simultané
Disque dur	250 Go. 20 Go disponibles pour le système 7 200 tr/min	750 Go. 20 Go disponibles pour le système 10k ou 15k tr/min
Caractéristiques graphiques	Carte graphique intégrée 128 Mo	Carte graphique dédiée 128 Mo
Système d'exploitation	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2016 Windows Server 2019
	Les serveurs physiques ainsi que les machines virtuelles sont compatibles.	Les serveurs physiques ainsi que les machines virtuelles sont compatibles.
Réseau	Connexion 1 Gb vers les machines client	Connexion 1 Gb vers les machines client
Carte réseau		Cartes à double jumelage pour quatre utilisateurs simultanés ou plus
Vitesse du réseau	100 Mbps	1 Gigabit ou plus

4 Désinstallation

Suivez la séquence ci-dessous pour désinstaller et supprimer Simplicit^{90Y}.

Il n'est pas nécessaire de supprimer les données des patients dans le cadre de la désinstallation du logiciel. La désinstallation du logiciel ne supprimera pas automatiquement toutes les données des patients.

4.1.1 Désinstallation du logiciel

Simplicit^{90Y} est désinstallé à l'aide de la fonctionnalité d'ajout/suppression de programmes de Windows, dans le Panneau de commandes.

Identifiez le programme **Simplicit^{90Y}** dans la liste des programmes installés et cliquez sur **Désinstaller**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour achever le processus de désinstallation.

4.1.2 Paramètres de configuration

La suppression de Simplicit^{90Y} d'une machine ne supprime aucun paramètre de configuration.

Si Simplicit^{90Y} est réinstallé ultérieurement, les paramètres de configuration antérieurs mémorisés sont préservés.

5 Mise à niveau de Simplicit^{90Y}

Pour mettre à niveau Simplicit^{90Y}, vous devez d'abord désinstaller l'application, comme décrit dans la section 4 de ce document, puis installer la nouvelle version de Simplicit^{90Y}.

5.1 Transfert des préférences utilisateur à partir des versions antérieures à 2.0

Si vous faites une mise à jour à partir d'une version antérieure à 2.0, vos préférences utilisateur ne sont pas automatiquement transférées vers la nouvelle version. Pour transférer vos paramètres, effectuez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous d'avoir enregistré la licence pour Simplicit^{90Y}, comme décrit dans la section 3.2.2.
2. Assurez-vous que DBx est fermé.
3. Cliquez sur le menu **Démarrer** de Windows et saisissez **Exécuter**. Ouvrez l'utilitaire **Exécuter**.
4. Saisissez `C:\Program Files\Mirada Medical\Advanced Dosimetry\bin\migrate-settings.exe` et appuyez sur **Entrée**. Le transfert de la configuration est effectué.

Remarque : vous devrez modifier le chemin d'accès au fichier dans la commande si vous avez installé Simplicit^{90Y} à un autre emplacement que l'emplacement par défaut.

Les paramètres des onglets suivants dans la fenêtre Options sont transférés :

- Quantification
- Segmentation
- Enregistrer et exporter
- Rapport
- Série par défaut

Les paramètres des onglets suivants dans la fenêtre Options **ne sont pas** transférés :

- Dose
- Informations sur l'établissement

Remarque : la première fois que vous utilisez Simplicit^{90Y} après son installation initiale, l'emplacement, les paramètres locaux et le fuseau horaire de l'application seront réglés en fonction des paramètres locaux et de l'emplacement du système d'exploitation sur lequel Simplicit^{90Y} a été installé.

6 Performances

Sauf accord explicite de Mirada Medical, la société décline toute responsabilité quant à la durée requise pour exécuter les fonctions dans l'environnement logiciel. Des exigences de performances spécifiques ne peuvent être acceptées que si le produit est installé sur du matériel spécifié par Mirada Medical.