

Guía de instalación de *Simplicit^{90Y}*TM

2.4.0

1 Introducción

1.1 Historial de revisiones

Problema	Fecha	Motivo de la publicación	Revisión publicada	Necesario por razones de seguridad
Guía de instalación de <i>Simplicit^{90Y}</i> 2.4.0	26 de octubre de 2020	Versión inicial	R0	N/D
Guía de instalación de <i>Simplicit^{90Y}</i> 2.4.0	18 de enero de 2021	Representante europeo autorizado añadido	R1	No

1.2 Propósito

Este documento describe el proceso de instalación del paquete de software *Simplicit^{90Y}*.

1.3 Alcance

Simplicit^{90Y} se suministra con una Guía de ayuda en línea en la que se explica cómo utilizar el software una vez instalado.

***Simplicit^{90Y}* se suministra con notas de la versión. En ellas encontrará información importante que debe leer antes de instalar y utilizar el software.**

1.4 Formatos alternativos

La versión en línea de las instrucciones de uso de *Simplicit^{90Y}* 2.4.0 (incluida esta guía de instalación) está disponible en <https://mirada-medical.com/eifu-Simplicit90Y-2-4-0-row/> y puede contener actualizaciones realizadas después de que usted recibiera su copia de *Simplicit^{90Y}* 2.4.0.

Las instrucciones de uso disponibles en el sitio web requieren el uso de un lector de documentos PDF. También necesitará un navegador web moderno (Internet Explorer 11, Firefox 62.0, Chrome 69.0 o versiones posteriores).

También tiene a su disposición una copia física de las instrucciones de uso de *Simplicit^{90Y}* 2.4.0 (incluida esta guía de instalación) previa solicitud a support@mirada-medical.com.


2 Información sobre el dispositivo y su fabricación



De conformidad con la Directiva del Consejo 93/42/CEE del Consejo



Emergo Europe B.V., Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague, The Netherlands

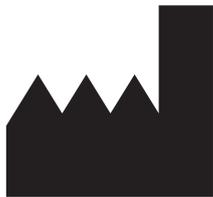

Mirada Medical Ltd.
New Barclay House
234 Botley Road
Oxford
OX2 0HP
Reino Unido



Fecha de fabricación: Diciembre de 2020



<https://mirada-medical.com/eifu-Simplicit90Y-2-4-0-row/>

3 Instalación

3.1 Software

Su proveedor le suministrará el software en un paquete para Windows con los componentes de instalación y la documentación asociada.

En el paquete se incluye:

- Programa de instalación de Simplicit^{90Y}
- Notas de la versión de Simplicit^{90Y}
- Guía de instalación de Simplicit^{90Y} (este documento)
- Guía de ayuda de Simplicit^{90Y} en formato PDF

Simplicit^{90Y} es un software de 64-bit y se ha de instalar en plataformas Windows de 64-bit.

La documentación se encuentra disponible en formato PDF.

3.2 Instalación

3.2.1 Cómo instalar Simplicit^{90Y}

Ubique y ejecute el archivo del programa de instalación de Simplicit^{90Y} y siga los mensajes que aparezcan en pantalla.

Al instalar este software, indica que acepta el contrato de licencia de usuario final que le muestra el programa de instalación.

Puede instalar el software en el lugar predeterminado o seleccionar un lugar alternativo.

Haga clic en **Install** para iniciar el proceso de instalación. Windows le puede mostrar un mensaje solicitándole que permita la instalación para seguir adelante.

Una vez que se complete la instalación, haga clic en **Finish**.

Nota: La primera vez que utilice Simplicit^{90Y} tras la instalación inicial, la ubicación, la configuración regional y la zona horaria de la aplicación estarán configuradas de acuerdo con las del sistema operativo en el que se ha instalado Simplicit^{90Y}.

3.2.2 Cómo añadir una licencia

Cuando se complete la instalación de DBx y Simplicit^{90Y}, estará listo para iniciar el procedimiento de licencia.

Poco después de iniciar DBx por primera vez, se le solicitará que introduzca una licencia para Simplicit^{90Y}.

Si aún no dispone de licencia para ese equipo, deberá solicitar una al representante de su proveedor. En dicha solicitud deberá incluir la clave de activación del producto que se muestra en la ventana *Código de licencia*.

Si va a usar una licencia flotante, póngase en contacto con su representante para que le indique cómo conectarse al servidor de licencias flotantes.

Una vez que el sistema cuente con la licencia correspondiente, estará listo para ser usado y se abrirá la ventana de DBx.

Seleccione datos y haga clic en el icono de **Simplicit^{90Y}**  en la barra lateral de la derecha para iniciar la aplicación. Para más información sobre cómo seleccionar datos, consulte la Guía de ayuda de Simplicity^{90Y}.

Tanto DBx como Simplicity^{90Y} disponen de archivos de ayuda en línea que proporcionan información importante sobre cómo usar el programa.

3.3 Requisitos del sistema

Simplicity^{90Y} solo se debe instalar en una red interna segura con medidas de protección adecuadas, como protección antivirus y antimalware, así como cortafuegos. Simplicity^{90Y} no requiere acceso a Internet.

Se deben configurar todos los permisos del nivel de usuario para asegurarse de que los usuarios solo disponen de los derechos de acceso necesarios para dicho nivel. Esto incluye permisos para todas las aplicaciones que están configuradas para enviar y recibir información de Simplicity^{90Y}. Todos los permisos de usuario se deben revisar regularmente.

Estación de trabajo/Portátil

Elemento	Especificaciones mínimas	Especificaciones recomendadas
Procesador	Intel Core i5 o equivalente	Intel Core i7 o equivalente
Memoria	8 GB RAM	16 GB RAM
Disco	250 GB. 10 GB disponibles, 7200 RPM	500 GB SSD. 10 GB disponibles
Gráficos	Tarjeta gráfica de 128 MB, DVI	Tarjeta gráfica de 512 MB, DisplayPort
Resolución de la pantalla	1920x1080	1920x1080, 2560x2048 o similar
Sistema operativo	Windows 7 (64-bit) SP1 Windows 10 (64-bit)	Windows 7 (64-bit) SP1 Windows 10 (64-bit)
Velocidad de la red	100 Mbps	1 Gigabit o superior

Servidor de clientes ligeros

Mirada recomendará de manera individualizada las especificaciones de los servidores a fin de asegurar su idoneidad para el entorno y el número de usuarios simultáneos. Esta tabla se ofrece solo a modo orientativo. Los equipos que se utilicen como clientes han de ser razonablemente modernos, aunque no es necesario que tengan unas especificaciones elevadas, y han de usar Windows 7 (SP1 recomendado) o Windows 10.

Elemento	Especificaciones mínimas	Especificaciones recomendadas
Procesador	Quad Core Xeon o equivalente E5420 2.50GHz	Tres núcleos/2,5 GHz por usuario simultáneo.
Memoria	16 GB RAM	16 GB RAM por usuario simultáneo
Disco	250 GB. 20 GB disponibles para el sistema 7200 RPM	750 GB. 20 GB disponibles para el sistema 10.000 o 15.000 RPM

Elemento	Especificaciones mínimas	Especificaciones recomendadas
Gráficos	Gráficos integrados 128 MB	Tarjeta gráfica integrada de 128 MB
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2016 Windows Server 2019
	Se pueden usar tanto servidores físicos como máquinas virtuales.	Se pueden usar tanto servidores físicos como máquinas virtuales.
Red	Conexión de 1 Gb a equipos clientes	Conexión de 1 Gb a equipos clientes
Tarjeta de red		Tarjetas duales para cuatro o más usuarios simultáneos
Velocidad de la red	100 Mbps	1 Gigabit o superior

4 Desinstalación

Siga la secuencia que se indica a continuación para desinstalar o quitar Simplicit^{90Y}.

No es necesario eliminar los datos del paciente como parte del proceso de desinstalación del software. La desinstalación del software no eliminará automáticamente ningún dato del paciente.

4.1.1 Cómo desinstalar el software

Simplicit^{90Y} se desinstala mediante la herramienta de Windows para añadir y quitar programas que encontrará en el Panel de control.

Identifique el programa **Simplicit^{90Y}** en la lista de programas instalados y haga clic en **Desinstalar**. Para completar el proceso de desinstalación, siga las instrucciones que se muestren en pantalla.

4.1.2 Ajustes de configuración

Al quitar Simplicit^{90Y} de un equipo, no se elimina ningún ajuste de configuración.

Si posteriormente se vuelve a instalar Simplicit^{90Y}, los ajustes de configuración que se hayan guardado anteriormente, se mantendrán.

5 Cómo actualizar Simplicit^{90Y}

Para actualizar Simplicit^{90Y}, primero debe desinstalar la aplicación, tal y como se indica en la sección 4 de este documento y, a continuación, instalar la nueva versión de Simplicit^{90Y}.

5.1 Cómo transferir las preferencias de usuario de versiones anteriores a la 2.0

Si actualiza el programa desde una versión anterior a la 2.0, sus preferencias de usuario no se transferirán automáticamente a la nueva versión. Para transferir su configuración, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Asegúrese de que cuenta con licencia para Simplicit^{90Y}, tal y como se describe en la sección 3.2.2.
2. Asegúrese de que DBx esté cerrada.
3. Haga clic en el menú **Inicio** de Windows e introduzca **Ejecutar**. Abra la herramienta **Ejecutar**.
4. Introduzca `C:\Program Files\Mirada Medical\Advanced Dosimetry\bin\migrate-settings.exe` y pulse **Intro**. Se llevará a cabo la transferencia de la configuración.

Nota: Si ha instalado Simplicit^{90Y} en un lugar distinto al predeterminado, deberá modificar la ruta del archivo en el comando.

Se transfiere la configuración de las siguientes pestañas de la ventana Opciones:

- Cuantificación
- Segmentación
- Guardar y exportar
- Informe
- Serie predeterminada

No se transfiere la configuración de las siguientes pestañas de la ventana Opciones:

- Dosis
- Datos del centro

Nota: La primera vez que utilice SimpliCity^{90Y} tras la instalación inicial, la ubicación, la configuración regional y la zona horaria estarán configuradas de acuerdo con las del sistema operativo en el que se ha instalado SimpliCity^{90Y}.

6 Rendimiento

Salvo acuerdo explícito de Mirada Medical, no se asume ninguna responsabilidad por el tiempo necesario para realizar funciones en el entorno del software. Los requisitos de rendimiento específicos solo se pueden acordar si el producto se entrega con el hardware especificado por Mirada Medical.